


HOSPIMEDIC BP7

Desinfectante concentrado para superficies y mobiliario en el ámbito sanitario

Nº DE REGISTRO AEMPS: 923-DES

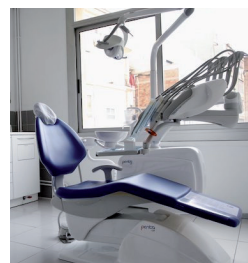

DESCRIPCIÓN

Desinfectante concentrado desengrasante de superficies y mobiliario de laboratorio en ámbito sanitario y hospitalario virucida, bactericida y fungicida.

MODO DE USO Y APLICACIÓN

Especialmente diseñado para la desinfección profunda de todo tipo de superficies no porosas (salas de espera, consultas médicas, habitaciones, ...) donde se requiera un amplio espectro de actividad.

Dilución al 4% - 5%.

Para su aplicación una vez diluido el producto, distribuir la solución mediante pulverización o manualmente (con bayeta o mopa aséptica) por toda la superficie a tratar. Una vez aplicado el producto dejar actuar y aclarar con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto Líquido transparente
- Densidad 1.01 ±0,05
- Solubilidad en agua Soluble
- PH 12,5 ±0,5
- Composición: Cloruro de Didecildimetilamonio 4,5%, Monoetanolamina 4,5%, Excipientes y solventes csp 100%

VENTAJAS

- **Virucida:** Cumple la norma europea UNE-EN 14476. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad virucida en medicina (Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Murine novovirus).
- **Bactericida:** Cumple la norma europea UNE-EN 13697, al 4% (v/v) posee actividad bactericida sobre superficies después de 5 minutos en condiciones sucias (solución acuosa de albúmina bovina 3g/l) para las cepas de referencia *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia Coli*, *Staphylococcus aureus* y *Enterococcus hirae*.
- **Fungicida:** Cumple la norma europea UNE-EN 13697, al 5% (v/v) posee actividad fungicida sobre superficies después de 15 minutos en condiciones sucias (solución acuosa de albúmina bovina 3g/l) para las cepas de referencia *Candida albicans* y *Aspergillus Niger*.
- Cumple la norma europea UNE-EN 13727 y UNEEN 13624, que lo certifica como bactericida y fungicida
- Inodoro e incoloro
- Sin aldehidos
- Sin formol

DILUCIÓN AL 5%

ACCIÓN VIRUCIDA, BACTERICIDA Y FUNGICIDA

1 Garrafa 5L = 133 botes de 750ml
1 Garrafa 5L = 100L de desinfectante

DILUCIÓN AL 4%

ACCIÓN BACTERICIDA

1 Garrafa 5L = 160 botes de 750ml
1 Garrafa 5L = 120L de desinfectante

FORMATOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	EAN	UNID. CAJA	CAJAS PALET
5072DS070	5L garrafa	8414580022970	4 x 5 L	32

PICTOGRAMAS:



Toda información arriba expuesta se basan en nuestros conocimientos actuales y son ciertos a la fecha de realización de este informe técnico. La empresa fabricante no puede asumir la responsabilidad del uso y aplicación de nuestro producto por no poder controlar la aplicación por parte del usuario. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.

Minimice el impacto ambiental de los productos utilizando formatos de mayor volumen. Gestione los envases vacíos adecuadamente.

Versión 1 05/10/20



www.bacterisan.com

LABORATORIOS
BILPER Group
www.bilper.com

